

**ZASADY BEZPIECZNEGO STOSOWANIA MASECZEK WIELORAZOWYCH- PREMIUM  
FIRMY LUMA MILANÓWEK**

1. Maseczkę nakładamy zgodnie z instrukcją.
2. Zużycie maski oceniamy tak jak w przypadku maseczki jednorazowej - jeśli zaczyna być wilgotna, należy ją zmienić. W tym celu należy ją ostrożnie zdjąć (nie dotykając wierzchniej warstwy), włożyć do woreczka foliowego i szczelnie zamknąć a następnie umyć ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Worek z zawartością przechowujemy do czasu prania.
3. Przed przystąpieniem do prania maseczki zakładamy jednorazowe rękawiczki. Maseczkę pierzemy w temperaturze **60°C**. Materiał maseczki zachowuje swoje właściwości do **20 prań**. Dozwolone jest bielenie tylko środkiem bezchlorowym. Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej- suszenie w niższej temperaturze.
4. Maseczkę prasujemy w maksymalnej temperaturze dolnej płyty **150°C**.